



CONTENTS

DÉNEGATION.....	2
BIENVENUE CHEZ SOTA.....	2
AVANT D'UTILISER.....	2
APPRENDRE PLUS.....	3
APPAREIL COMPLÈT COMPREND	3
NE PAS UTILISER	3
PRÉCAUTIONS.....	4
RÉSUMÉ DE LUMIÈRES.....	4
COMMENT UTILISER LE BIO TUNER.....	4
Comment il doit sentir.....	7
Usage typique	7
Comment changer les contacts conducteurs.....	8
OPÉRATION DES SIX MODES	8
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	9
Exigences d'alimentation	9
Alimentation en option	9
Spécifications de sortie	9
DÉPANNAGE	10
LES PAYS QUI PARTICIPENT À LA FABRICATION	10
ACCESSOIRES DE REMPLACEMENT.....	10
GARANTIE	10
RÉPARATIONS.....	10

DÉNÉGATION

SOTA Instruments Inc. ne peut que vérifier l'exactitude des informations fournies en anglais. Votre utilisation de ce manuel traduit indique que vous comprenez et acceptez que SOTA Instruments Inc. n'assume aucune responsabilité pour toute inexactitude, perte, avarie ou tout autre problème, direct ou indirect résultant de l'utilisation de ce manuel. S'il ya des préoccupations quant à l'exactitude de l'information traduite, prière de se référer au manuel officiel de langue anglaise, disponible en téléchargement sur www.sota.com.

BIENVENUE CHEZ SOTA

Merci de nous avoir choisis de faire partie de votre équipe de bien-être.

Le Bio Tuner est un bien de consommation conçu pour compléter un mode de vie sain. Un engagement à choisir un mode de vie sain est un facteur important dans le voyage au bien-être.

Le Bio Tuner de SOTA soutient la connexion esprit-corps. Il produit une large gamme des fréquences harmoniques qui aident à créer un sentiment de calme, d'équilibre et de tranquillité.

Le Bio Tuner est conçu pour être utilisé de manière indépendante, mais peut également être utilisé en combinaison avec d'autres produits SOTA Products.

Avec un usage normal Le Bio Tuner va durer pendant de nombreuses années sans soucis.

Garder à l'esprit, que les résultats peuvent varier.

AVANT D'UTILISER

Prière de lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le Bio Tuner. Pour le manuel plus récent, voir www.sota.com/manuals.


Nous veillons à ce que les informations contenues dans votre manuel soient à jour au moment de l'impression; cependant, depuis l'impression, gardez à l'esprit que de nouvelles informations peuvent être disponibles.

APPRENDRE PLUS

Pour apprendre plus, nous vous invitons à visiter le site Web SOTA

www.sota.com

Le site propose des vidéos pédagogiques, des questions fréquemment posées, *Le guide des produits SOTA*, les nouvelles SOTA ... et plus.

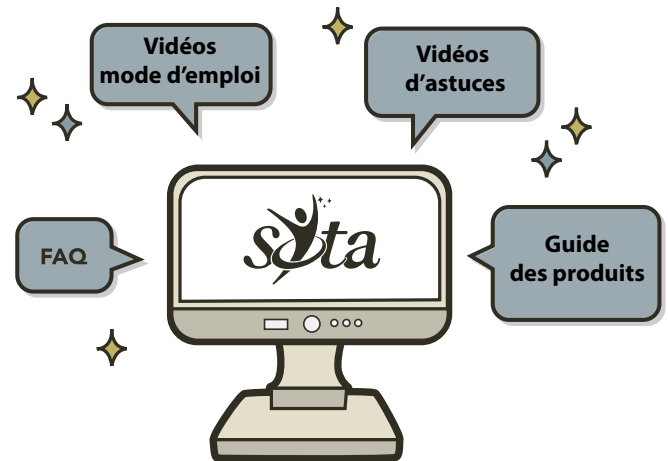

APPAREIL COMPLÈT COMPREND

- Un (1) appareil Bio Tuner
- Un (1) paire de clips d'oreille
- Deux (2) paires de contacts conducteurs
- Un (1) cordon
- Un (1) brassard avec clip
- Une (1) pile alcaline de 9 volts
- Une (1) sacoche
- Un (1) manuel d'instruction

NE PAS UTILISER

1. Dans les cas suivants, car la sécurité n'a pas été explorée:
 - a. Si vous êtes enceinte.
 - b. Si vous avez un dispositif implanté tel qu'un stimulateur cardiaque, etc.
2. Comme il est recommandé pour tous les appareils électriques, ne pas utiliser près de l'eau, au volant, ou pendant l'opération d'un équipement lourd.
3. Ne faites pas le suivant:
 - a. Ne pas augmenter l'intensité à un niveau élevé. Pour plus de sécurité, augmenter graduellement l'intensité.
 - b. Ne pas brancher le cordon ou le soutien à d'autre prise USB comme celle de l'ordinateur ou d'autres sources d'alimentation. Ne pas connecter au Bio Tuner d'autres connexions USB sauf le cordon du Bio Tuner.

PRÉCAUTIONS

1. Si vous prenez la médecine psychiatrique, ou si vous souffrez d'une maladie neurologique, ou si vous avez des convulsions, prière de consulter votre professionnel de la santé avant d'utiliser le Bio Tuner.
2. Dans de très rares cas, les individus ont signalé le début ou l'aggravation de l'acouphène, lors de l'utilisation de l'appareil. Si vous ressentez de l'acouphène ou un bourdonnement dans les oreilles, svp cesser d'utiliser l'appareil.
3. Dans de très rares cas, les individus ont signalé un mal de tête ou une douleur du nerf lors de l'utilisation de l'appareil. Si vous ressentez un mal de tête ou une douleur du nerf, svp cesser d'utiliser l'appareil.
4. Bien que cette technologie est généralement considérée comme sûr, il y'a le potentiel pour de réactions individuelles rares qui ne peuvent pas être raisonnablement prévisibles. Par conséquent, votre utilisation des produits SOTA constitue votre accord que vous êtes responsables de votre décision d'utiliser cette technologie.

RÉSUMÉ DES LUMIÈRES


VERTE: Indique le mode selectioné.


ROUGE: Indique que la pile est faible.

JAUNE: Utilisé comme un test pour assurer le flux de courant à travers l'appareil, le cordon et les clips d'oreille.

COMMENT UTILISER LE BIO TUNER

1. Placer la pile alcaline de 9 volts dans l'appareil.
 - a. Faire glisser le couvercle de la pile (sur la face arrière de l'appareil).
 - b. Mettre la pile lorsque le borne positif (+) et borne négatif (-) sont en ligne, comme dans l'image 1.
NB: Le petit cercle sur la pile correspond au petit cercle dans le compartiment.
 - c. Insérer la pile dans le compartiment et poussez-la en place.
 - d. Remettre le couvercle en le faisant glisser.
2. Nettoyer les lobes de l'oreille pour éliminer les huiles de la peau. Ceci permettre une meilleure conductivité.

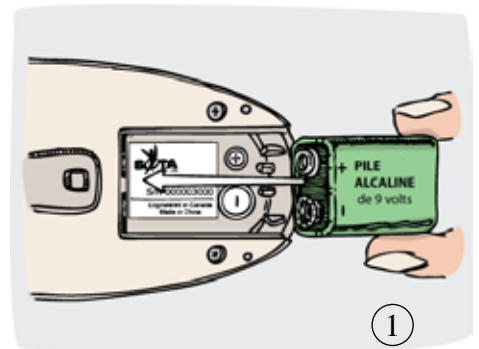

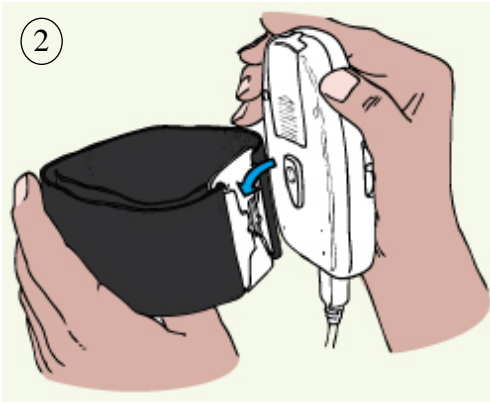

3. Positionner le clip qui se trouve derrière le Bio Tuner dans la prise du brassard comme dans l'image 2 .

4. Insérer la fiche du cordon dans la prise de l'appareil comme indiqué dans l'image 3. Assurer que le symbole USB sur la fiche du cordon est orienté vers le haut. Lorsqu'elle est positionnée correctement, elle glisse doucement. Ne pas forcer.


5. Placer le brassard

auquel est attaché l'appareil avec le cordon, sur la partie supérieure du bras dans une position confortable. Serrer le brassard pour le fixer en place, comme dans l'image 4.

Option: Si vous le préférez, mettre l'appareil dans votre poche.

6. Insérer les électrodes du cordon dans les clips d'oreille.

7. Sur les clips d'oreille, faire mouiller les contacts noirs avec de l'eau ou du gel lubrifiant.

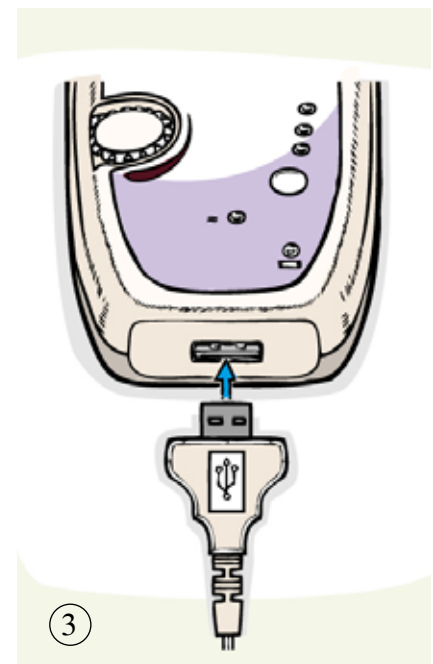

8. Placer un clip d'oreille sur chaque lobe d'oreille, positionnant le clip d'oreille avec le contact conducteur noir en arrière du lobe de l'oreille, et tout près de la mâchoire, comme dans l'image 5.

9. Allumer l'appareil en tournant lentement la molette ON/OFF pour le sens horaire.

Tous les lumières clignotent une fois et l'appareil émet un bip avant le démarrage de l'appareil en mode 1. Si les lumières ne s'allument pas, la pile n'est pas placée correctement.

10. Tourner lentement la molette ON/OFF pour le sens horaire jusqu' a un niveau confortable. Le niveau d'intensité doit sentir confortable. Voir 'Comment il doit sentir' à la page 7.

11. Modifier les modes en appuyant sur le bouton mode. La lumière VERTE indique


quel mode est sélectionné et que la synchronisation a commencé. Voir l'information sur les modes à la page 8.

12. L'appareil émettra deux bips lorsque la session de 20 minutes a terminé. Il passe automatiquement en mode veille et la lumière VERTE clignote toutes les 2 secondes.

- a. En mode veille, la pile est toujours utilisée. Pour économiser la pile, éteindre l'appareil.
- b. Pour éteindre l'appareil, tourner l'interrupteur dans le sens antihoraire jusqu'à ce qu'il s'enclenche. Ne pas forcer l'interrupteur à dépasser son point d'arrêt naturel.

13. Pour faire des sessions supplémentaires éteindre l'appareil et redémarrer selon l'étape 9. Faire mouiller les clips d'oreille entre chaque cycle chronométré.

14. Débrancher le cordon. Ne pas stocker l'appareil avec le cordon branché car cela peut endommager le cordon.

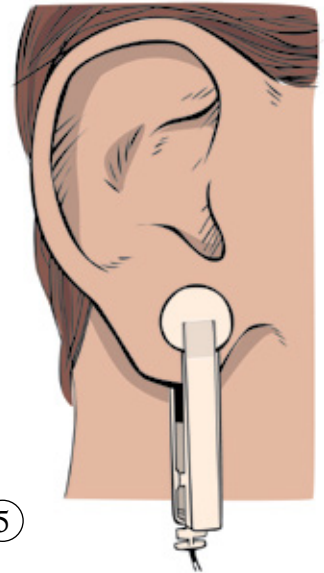


Notes:

Clips d'oreille: Les clips d'oreille peuvent sentir plus confortables si plutôt que de l'eau, vous additionnez un gel conducteur ou un gel d'aloë vera au contacts. Au fil du temps, le caoutchouc conducteur noir des clips d'oreille peuvent perdre leur conductivité et devront être remplacés.

Modification des modes: Lorsque le mode est modifié pendant une session, le chronométrage se poursuit sans interruption pour terminer une session d'environ 20 minutes.

Sortie: La lumière JAUNE est utilisée pour tester la sortie de l'appareil. En période normale lorsque l'appareil est allumé et les clips d'oreille sont positionnés correctement, la lumière JAUNE peut ou non s'allumer. Tant que le courant est ressenti, l'appareil fonctionne bien, indépendamment de la lumière JAUNE.

Entretien du cordon du Bio Tuner et des clips d'oreiller: Retirer des fois, les contacts conducteurs noirs des clips d'oreille pour les nettoyer dans une solution de

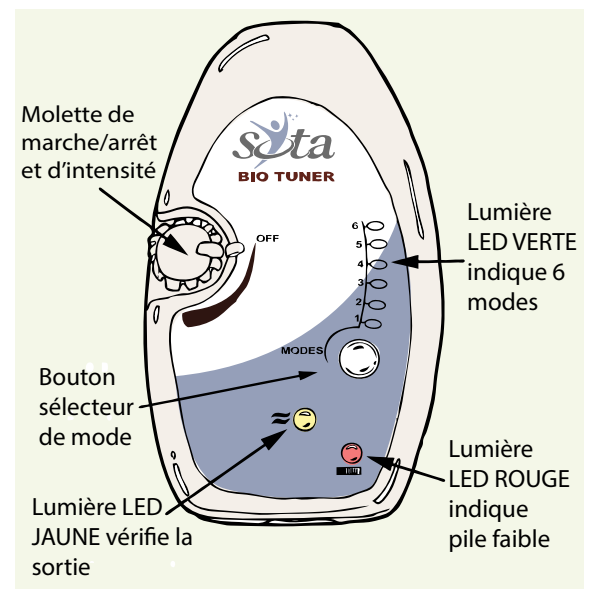

savon doux. Rincer bien. Si nécessaire, essuyer doucement les électrodes du cordon du Bio Tuner.

Avvertissement de pile faible: La lumière ROUGE s'allume et l'appareil émet un bip quand la pile est faible. Cela signifie que la pile devra bientôt être remplacée.

Remplacer la pile: Les piles de 9 volts varient en taille, donc au moment d'acheter une nouvelle pile 9 volts, apporter le Bio Tuner avec vous pour assurer un bon ajustement.

COMMENT IL DOIT SENTIR

1. La sensation est un bourdonnement agréable. Il n'est pas nécessaire de augmenter a un niveau inconfortable. S'il y a des sensations épineuses:
 - a. Faire mouiller de nouveau les contacts conducteur des clips d'oreille.
 - b. Appliquer gel conducteur ou gel d'aloë vera aux lobes de l'oreille.
 - c. Nettoyer les contacts conducteurs noirs.
 - d. Remplacer les contacts conducteurs.
2. Avec l'usage répété, la sensation de bourdonnement peut diminuer. Augmenter l'intensité si désiré.
3. C'est normal de sentir le courant d'un cote plus que l'autre.
4. Dans de rares cas, certaines personnes ne sentent pas le courant.

USAGE TYPIQUE

Durée de la séance: Un cycle dure environ 20 minutes. Une session peut être 1 ou 2 cycles (20 à 40 minutes).

L'appareil peut être utilisé jusqu'à trois sessions par jour, espacées au cours de la journée. Il faut souvent au moins 30 jours d'utilisation pour profiter des avantages

Durée d'usage: L'appareil doit être utilisé quotidiennement, pendant un minimum de 4 semaines. Une fois que les avantages sont obtenus, il suffit de l'utiliser au besoin.

Niveau d'intensité: L'intensité doit toujours être réglé à un niveau confortable. Assurez-vous de réduire l'intensité avant de changer de mode. Une fois le nouveau mode est sélectionné, réajuster l'intensité.

Peau sensible: Durant les premières semaines d'utilisation, la peau peut devenir irritée. Au fil du temps, normalement, l'irritation diminue ou disparaître. Appliquer

une lotion curative après la session, si les lobes de l'oreille deviennent rouges ou irrités.

Boire beaucoup d'eau: Il est important de boire suffisamment d'eau lorsque vous utilisez l'appareil. Boire de l'eau ozonée est particulièrement utile.

Arrêter progressivement: Réduire la quantité de temps chaque jour durant la dernière semaine d'utilisation.

COMMENT CHANGER LES CONTACTS CONDUCTEURS

1. Enlever les clips d'oreille du cordon.
2. Tirer doucement les contacts conducteurs noirs hors des clips d'oreille.
3. Insérer les nouveaux contacts conducteurs dans les clips d'oreille. Appuyer l'électrode en place.

OPÉRATION DES SIX MODES

Le Bio Tuner offre six modes différents pour expérimenter et découvrir ce qui sent le mieux et ce qui fonctionne le mieux. Essayer différents modes pour déterminer ce qui est le plus confortable.

Un mode n'est pas considéré comme plus bénéfique qu'un autre.

Avec chaque mode, la fréquence de base de 1000 Hz modulée par 111.11 Hz est présente. Les modes 4, 5, et 6 ont un toucher plus doux.

Voir le tableau des modes à la page 9 ou suivant.

LES MODES DU BIO TUNER

MODE 1-3 (550 uS largeur d'impulsion)

Mode 1: 1,000 Hz modulé par 111.11 Hz,
Sortie = continuuel

Mode 2: 1,000 Hz modulé par 111.11 Hz,
Sortie = 1 second qui émet, 1 second qui n'émet pas (0.5 Hz)

Mode 3: 1,000 Hz modulé par 111.11 Hz,
Sortie = amplitude modulé par 7.83 Hz onde sinusoidal Schumann (Terre)

MODE 4-6 (220 uS largeur d'impulsion)

Mode 4: 1,000 Hz modulé par 111.11 Hz,
Sortie = continuuel

Mode 5: 1,000 Hz modulé par 111.11 Hz,
Sortie = 1 second qui émet, 1 second qui n'émet pas (0.5 Hz)

Mode 6: 1,000 Hz modulé par 111.11 Hz,
Sortie = amplitude modulé par 7.83 Hz onde sinusoidal Schumann (Terre)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

EXIGENCES D'ALIMENTATION

Utiliser une pile alcaline de 9 volts pour un fonctionnement correct.

ALIMENTATION EN OPTION

Le Bio Tuner peut fonctionner avec des piles rechargeables. Au moment de l'achat, nous vous suggérons d'apporter l'appareil avec vous pour s'assurer que les piles s'adaptent correctement.

SPÉCIFICATIONS DE SORTIE

Maximum 1.5mA crête ~40 volts de pointe à pointe dans une charge typique de 4k ohms. Minimum 10uA, 10 volts de pointe à pointe au réglage le plus bas. Impédance de sortie ~ 20k ohms.

1,000 Hz (+/- 1%) modulé par 111.11 Hz (+/- 1%). Les formes d'onde sont contrôlées par cristal quartz pour une sortie de fréquence précise. Il existe une large gamme de

fréquences harmoniques délivrées dans chaque impulsion, comme observé sur un analyseur de spectre de domaine fréquentiel.

Les impulsions ont une sortie de courant alternatif (AC) sans courant continu (DC) et sans biais de décalage. La sortie est couplée au transformateur, de sorte qu'aucun courant continu ne peut apparaître aux électrodes.

DÉPANNAGE

Un guide de dépannage pour le Bio Tuner est disponible à www.sota.com/manuals. Ce guide est un excellent outil pour vérifier s'il y a des problèmes avec votre appareil. www.sota.com/manuals.

LES PAYS QUI PARTICIPENT À LA FABRICATION

La fabrication des produits SOTA est une collaboration mondiale. Les pays suivants ont participé à l'élaboration du Bio Tuner (par ordre alphabétique): **Le Canada, La Chine, Les E.U, Le Hong Kong, La Malaisie, Le Taïwan et La Thaïlande.**

ACCESSOIRES DE REMPLACEMENT

Pour remplacer vos accessoires, prière de contacter le fournisseur.

GARANTIE

Le Bio Tuner modèle BT9 porte une garantie de trois (3) ans. Prière de garder la preuve d'achat. La garantie est nulle si la défaillance est due à l'abus ou à la négligence. SOTA se réserve le droit d'apporter des modifications au Bio Tuner sans obligation.

RÉPARATIONS

Contactez votre fournisseur pour les instructions de comment retourner votre produit. Pour plus d'informations sur le centre de réparation le plus proche, contactez: repairs@sota.com ou appeler sans frais : 1.800.224.0242 (Canada et les États-Unis)
Tél: 1.250.770.2023



Fabriqué en Chine et conçu au Canada.